


Maybe Baby'nin Parçaları

Sevgili Bayanlar, Maybe Baby ürününüzün parçaları ve kullanımı çok basittir. Cihaz 4 ana bölümden oluşmaktadır.



1. Koruyucu kılıf
2. Optik başlık.
 - 2.1 takip ekranı
 - 2.2 tükürük tatbik edilen bölüm
3. cihazın ana gövdesi
4. Cihazın elektronik bölümü
 - 4.1 Işık kumanda düğmesi
 - 4.2 pil yuvası ve pil


Maybe Baby Kullanımı

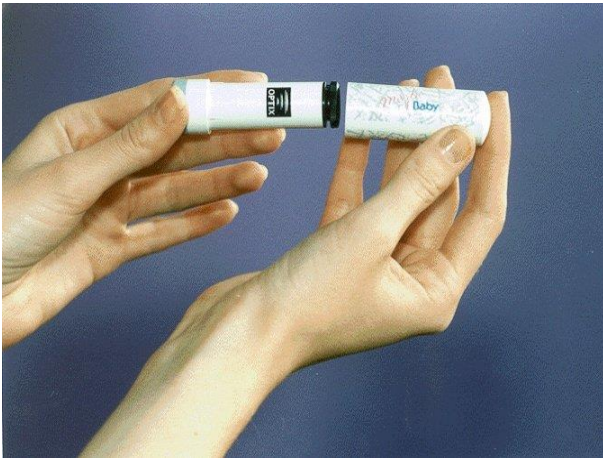

1. Cihazınızı itina ile koruyucu kılıfından çıkartınız.



2. Optik kısmı çıkartınız

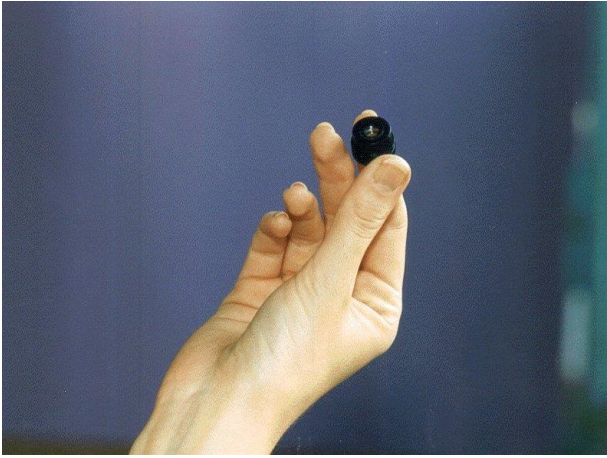

3. Optik kısmın temiz ve daha önceki kullanımınızdan görüntü kalmamış olmasına dikkat ediniz.



3. Sabah kalktığınızda hiçbir şey yemeden ve içmeden önceki ilk tükürüğünüzden bir miktar parmağınız ile dilinizden alıp itina ile optik kısma sürünüz. Ne çok fazla ne çok az olmalı, bütün optik kısmı kaplamalı ve akmayacak şekilde sürülmelidir. Sürüldükten sonra 2-3 saniye kadar sabitlenmesini beklemekte yarar var.

KULLANIM SONRASI GÖZLÜKTEMİZLEME BEZİ İLE TEMİZLEYİP

OPTİK KISMI VE CİHAZI TEMİZ BİR ŞEKİLDE ERTESİ GÜN KULLANMAK İÇİN KALDIRINIZ.

